

## ZUBEHÖR FÜR ACKERMANN RUFSYSTEME



### **Multi-Service-Gummersbach GmbH**

Gummersbacher Str. 44-48  
51645 Gummersbach  
Telefon: 02261 40580-0  
Telefax: 02261 40580-80  
E-Mail: [msg@msgm.de](mailto:msg@msgm.de)  
Internet: [www.msgm.de](http://www.msgm.de)



## Funkempfänger-Set 868 MHz

Bestehend aus:

Funkempfänger, mit integrierter Ruftaste, ausgeführt mit einem potenzialfreien Schaltkontaktausgang, programmierbar für Rufanlagen mit Rufkreisüberwachung oder in Arbeitsstromtechnik. Ausgestattet mit übersichtlichen LED-Statusanzeigen für Betriebsanzeige sowie für Quittierungsmeldung einer eingegangenen Rufmeldung. Einfache Zuweisung von bis zu 64 Einheiten an den Funkempfänger, für kompatible Funkeinheiten ist alternativ ein Master-Modus einstellbar. Dabei reagiert der Empfänger unabhängig von der Zuordnung (Pairing) auf alle eingehenden Meldungen (z.B. in Aufenthaltsräumen).

Funk-Handsender IP68 868 MHz mit roter Ruftaste in wasserdichtem Gehäuse. Verwendung des Handsenders alternativ mit Stretcharmband oder Umhängeband. Stromsparende Elektronik unterstützt durch eine intelligente Batterieüberwachung, die auch die Übertragung des Batteriezustandes an den Funkempfänger beinhaltet. Bei Rufauslösung erfolgt eine zeitlich begrenzte optische Bestätigungsanzeige für die hilfesuchende Person.

**Artikelnummer: 310364**

**Funkhandsender einzeln:**

**Artikelnummer: 310367**

**Funkempfänger einzeln:**

**Artikelnummer: 310368**



## Kontakt-Trittsensormatte - Funkruf

(Umschaltbar für Arbeits- und Ruhestrom)

Robuste professionelle Kontakt-Trittsensormatte zur Überwachung von Personenbewegungen, auch für Demenz- oder Vitaldedektion. Stabile tritt-, rutsch- und stolperfeste Ausführung mit abgeschrägten Kanten und leicht zu reinigender Oberfläche in Noppenstruktur.

Maße: 1100 mm x 700 mm x 9 mm

Mit Funksender und zugehörigem Funkempfänger mit 7 pol- DIN-Stecker

**Artikelnummer: 031251RA**



## Kontakt-Tretmatte/Dementmatte

(Umschaltbar für Arbeits- und Ruhestrom)

Druckempfindliche Bettvorlage für demente und sturzgefährdete Personen. Verwendung nur in Verbindung mit einer entsprechenden Schutzabdeckung, z. B. einer Schmutzfangmatte.

Maße: 720 mm x 390 mm x 3 mm

Länge Anschlusskabel: 5m

Stecker: 7-polig DIN

**Artikelnummer: 031230RA**

Zubehör: Artikelnummer 031230RAS Schmutzfangmatte



## Pneumatischer Sensortaster

(Umschaltbar für Arbeits- und Ruhestrom)

Zur Rufauslösung durch leichteste Berührung der großen Gummidruckfläche (Ø 90 mm), integrierte Beruhigungsanzeige. Nicht in Nasszellen verwendbar. (Schutzart IP44)

Anschluss-Kabel 3 m  
Stecker 7-pol. DIN

**Artikelnummer: 310272RA**



## Wasserdichter Ruftaster IP66

für Einsatz in Nasszellen

Elegantes, superflaches Design. Kreisförmige Betätigungsfläche (Ø 35 mm) mit antiseptischer Oberfläche, optisch umlaufender Beruhigungsanzeige und Findelicht.

Montage auf 55-er Schalterdose oder AP-Montage

Maße: 80 mm x 80 mm x 19 mm

**Artikelnummer: 310270R (Ruhestrom)**

**310270A (Arbeitsstrom)**



## Wasserdichter Zugtaster IP66

(Umschaltbar für Arbeits- und Ruhestrom)

Für Wand- oder Deckenmontage  
(für Deckenmontage Zubehör erforderlich).

Elegantes, superflaches Design. Optisch umlaufende Funktions-/Beruhigungsanzeige. Zugschnur 1,8 m mit integriertem Suizid-schutz durch Solltrennung des Zugelements bei unzulässiger Belastung. Montage auf 55-er Schalterdose.

Maße: 80 mm x 80 mm x 19 mm

Universell einsetzbar.

**Artikelnummer: 3102712**



## Wasserdichter Doppel-Zugtaster IP66

Für Wandmontage in elegantem, flachen Design.

Kombinierter Zug- und Abstelltaster zum Einsatz in Nasszellen, in denen bisher kein separater Abstelltaster montiert war.

Optisch umlaufende Funktions-/Beruhigungsanzeige.

Zugschnur Länge ZT: variabel bis 3,0 m rot

Zugschnur Länge AT: variabel bis 0,75 m grün

Mit integriertem Suizidschutz durch Solltrennung des Zugelements bei unzulässiger Belastung. Montage auf 55er Schalterdose.

Einbautiefe 10 mm. Betriebsspannung: 24 V DC

Potentialfreie Schaltkontaktausgänge :

RT- Umschalter Öffner & Schließer / AT - Schließer

Maße: 80 mm x 80 mm x 20 mm

**Artikelnummer: 3102730**



## VarioMent Wegläuferschutz Alarm

Der einfach montierbare Funk-Wegläuferschutz für Ihre Schwesternrufanlage, Sender: 869 MHz

Prozessorgesteuerter Alarm Sender mit Neigungsauslösung. Einfache Montage an Türklinken mittels Klinkenadapter. Klinkenadapter Montage Set für Kliniken rund 16-30mm, sowie viereckige Klinken 22-25mm sind im Lieferumfang enthalten.

Intelligente Batterieüberwachung mit Kontrollmeldung an zugehörige Empfänger.

Set-Artikel bestehend aus:

**Artikelnummer: 310414 Alarmsender**  
**310415 Magnetschlüssel**  
**310416 Funkempfänger**

Artikel auch einzeln nachbestellbar.



## Piltaster

Wasserdicht (IP67), mit roter Beruhigungs-LED. Robustes universell einsetzbares Gerät zur grobmotorischen Rufauslösung z.B. mit Fuß, Kopf, Arm etc.

Geeignet zur vielseitigen Montage durch vorgefertigte Befestigungsbohrungen. Der Anschluss erfolgt über ein 3 m Anschlusskabel und 7-poligem DIN-Stecker am Steckplatz des Birntasters. Weitere Steckverbindungen auf Anfrage.

### Funkruf

**Artikelnummer: 310205PR (Ruhestrom)**  
**310205PA (Arbeitsstrom)**

### kabelgebunden

**Artikelnummer: 310261R (Ruhestrom)**  
**310261A (Arbeitsstrom)**



## Pneumatikkissensender

mit Funkempfänger 869 MHz

Der MediPad Pneumatik- Kissensender dient als Rufeinheit für motorisch stark eingeschränkte Personen. Auf Grund seiner Größe und Funktion ist es möglich, Rufe durch leichten Druck auszulösen. Der Ruf wird drahtlos über den Empfänger an das Ackermann Rufsystem übergeben. Befestigung über im Lieferumfang enthaltene Klettbänder. Batterieüberwachung

Für Arbeits- und Ruhestromsysteme

**Artikelnummer: 310370**



## Pneumatischer Birntaster

Zur Rufauslösung durch sehr geringen Druck auf den Gummiball.

Mit 7-poligem DIN-Stecker  
Isolierstoffschlauch 1,9 m, mit Gummiball und Halteklipp

**Artikelnummer: 70007A (Ruhestrom)**  
**70005A (Arbeitsstrom)**



## Geräuschmelder/Schallwächter

Integrierter Ein-Ausschalter  
Manueller Direkttruf  
Extern einstellbare Empfindlichkeit und Ansprechverhalten  
Design-Tischgehäuse  
Anschluss-Kabel 3 m  
Stecker 7-pol. DIN

**Artikelnummer: 310212R (Ruhestrom)**  
**310212A (Arbeitsstrom)**



## Pneumatische Atem-Rufeinheit

mit 7-poligem Stecker zum Einsatz für bewegungsunfähige Patienten. Die Einheit wird über einen 7-poligen Nebensteckkontakt mit dem Patienten-Rufsystem verbunden. Die Rufauslösung erfolgt pneumatisch durch kräftiges Hineinatmen.

**Artikelnummer: 70007B (Ruhestrom)**  
**70005B (Arbeitsstrom)**

Zubehör:  
Artikelnummer: 70005BZ  
Mundstücke (1 VPE= 12 Stück)



## LED - Kolbenlampe 24V

Nur für Gleichspannungsanlagen

Verpackungseinheit= 5 Stück


**Artikelnummer: 310800R (rot)**  
**Artikelnummer: 310800G (grün)**  
**Artikelnummer: 310800K (klar)**  
**Artikelnummer: 310800GB (gelb)**

## Y-Adapter

(Umschaltbar für Arbeits- und Ruhestrom)  
Auslieferungszustand: Ruhestrom

Zum Anschluss von zwei Endgeräten,  
z. B. Birntaster und Funkrufsatz an einer Ackermann- Rufeinheit.

**Artikelnummer: 951032**

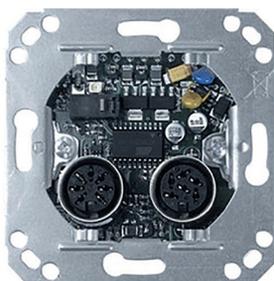

## Rufeinheit mit Ruftaster und 2 Steckkontakten für Ruhestromsysteme

Rufeinheit zur Rufauslösung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang. Bewegliche Rufeinheiten wie Birn- und Mehrfachtaster werden an den Steckkontakten (2x7-polig) angeschlossen. Überwachung der angeschlossenen Rufeinheiten (Rufkreisüberwachung).

**Artikel-Nr.: 73075E**

Zubehör:  
88914A3/N - Rahmen für Abdeckplatte 1-fach,  
88881J3/N - Abdeckplatte mit Taste rot für zwei Steckkontakte

Abb. ähnlich



## Weitere innovative Produkte als Zubehör für Ackermann Rufsysteme

finden Sie auf unserer Internetseite:

[www.msgm.de](http://www.msgm.de)

So erreichen Sie gezielt unsere Fachbereiche:

### **Vertrieb und Ersatzteilberatung:**

Frau Krieger, Frau Gossens, Frau Rennhack 02261-40580-17

E-Mail: [vertrieb@msgm.de](mailto:vertrieb@msgm.de)

### **Angebote:**

Frau Nierstenhöfer 02261-40580-24

E-Mail: [nierstenhoefer@msgm.de](mailto:nierstenhoefer@msgm.de)

### **Technischer Support und Außendienst-Terminplanung:**

Herr Barth 02261-40580-12

E-Mail: [terminplanung@msgm.de](mailto:terminplanung@msgm.de)

### **Vertrieb Außendienst/Wartungsverträge:**

Herr Sager 02261-40580-15

E-Mail: [sager@msgm.de](mailto:sager@msgm.de)

Multi-Service-Gummersbach GmbH

Gummersbacher Str. 44-48

51645 Gummersbach

Telefon: 02261-40580-0

Fax: 02261-40580-80

E-Mail: [msg@msgm.de](mailto:msg@msgm.de)

Internet: [www.msgm.de](http://www.msgm.de)